




BRUSHES
Scovolini per la pulizia delle cannule chirurgiche

CISA

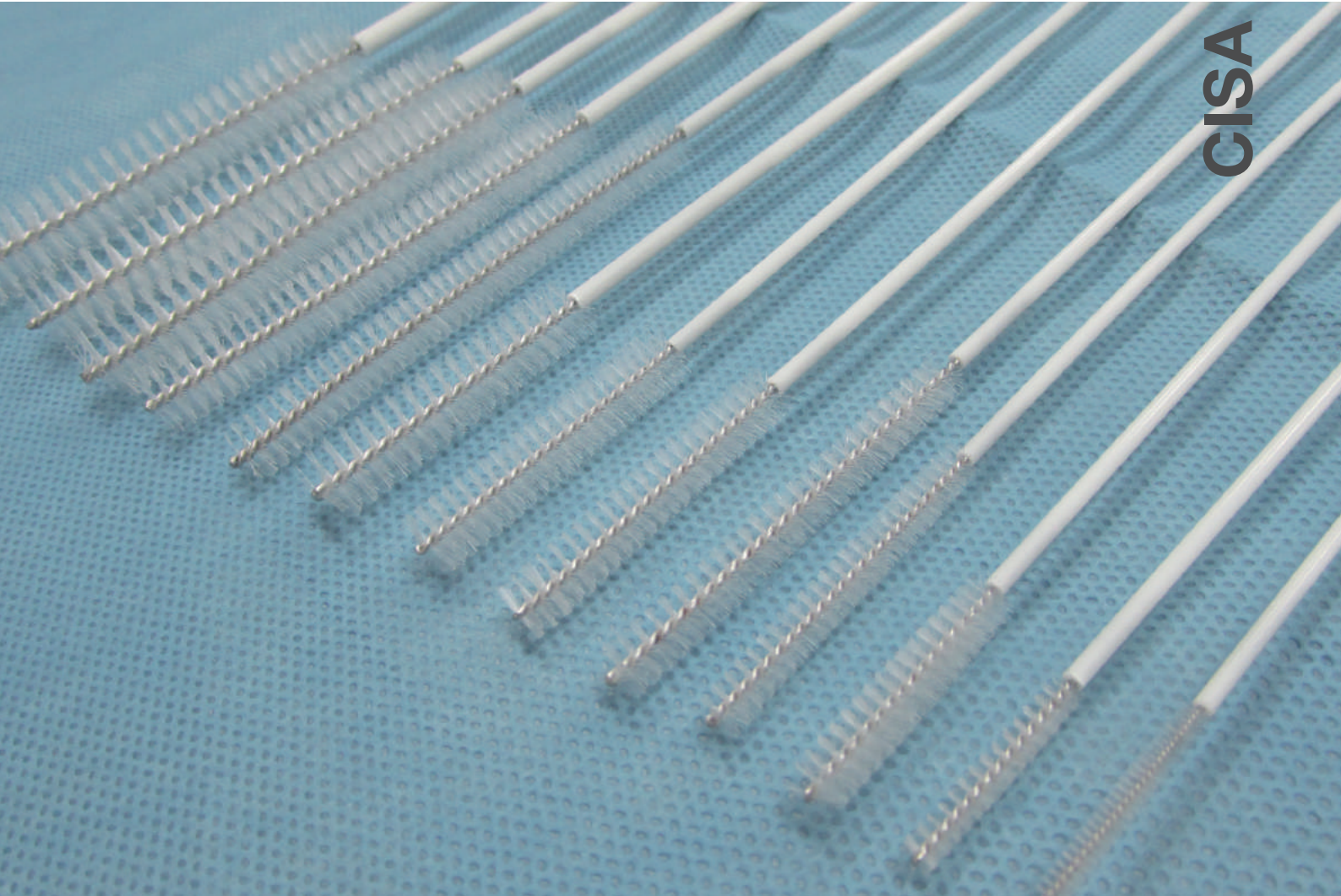

CISA BRUSHES

Scovolini per la pulizia delle cannule chirurgiche

Abbiamo a cuore l'healthcare. Abbiamo a cuore la sicurezza dei pazienti quotidianamente. Gli scovolini Cisa per la pulizia delle cannule sono progettate per facilitare l'operazione di pulizia degli strumenti chirurgici.

La presenza di modelli con dimensioni differenti, garantiscono la corretta procedura di pulizia.

Gli scovolini possono essere sterilizzati in macchine per la disinfezione e sterilizzatori a basse temperature.

Qualità

Spazzola realizzata in nylon e filo di acciaio inossidabile 304, attaccata ad un manico in polipropilene e con anello identificativo colorato.


Facili da usare

Inserire lo scovolino con le setole inumidite con detergente, nello strumento e spostarlo senza forza eccessiva.

Assicurarsi che il manico abbia un diametro inferiore rispetto alla cannula.

Soluzioni

- Kit con 14 modelli diversi, composti da 3 scovolini per ogni modello
- Confezione da 10 scovolini per ogni modello

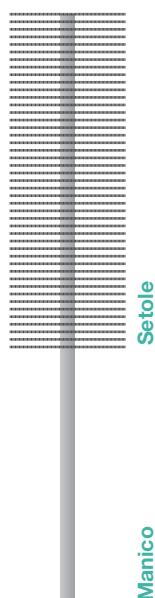

Codice	Setole		Manico	
	Diametro	Lunghezza	Diametro	Lunghezza
CE-C-K30-02B010	2mm	20mm	1.5mm	300mm
CE-C-K30-03R010	3mm	20mm	1.8mm	300mm
CE-C-K30-04G010	4mm	35mm	1.8mm	300mm
CE-C-K30-05K010	5mm	25mm	1.8mm	300mm
CE-C-K35-06Y010	6mm	70mm	2.5mm	350mm
CE-C-K35-07B010	7mm	70mm	2.5mm	350mm
CE-C-K35-08R010	8mm	70mm	3mm	350mm
CE-C-K35-10G010	10mm	70mm	3mm	350mm
CE-C-K35-12K010	12mm	70mm	4mm	350mm
CE-C-K55-05Y010	5mm	50mm	2mm	550mm
CE-C-K55-06B010	6mm	35mm	2mm	550mm
CE-C-K55-07R010	7mm	35mm	2mm	550mm
CE-C-K55-10G010	10mm	70mm	3mm	550mm
CE-C-K55-12K010	12mm	70mm	4mm	550mm



Cisa production headquarters

Via Enrico Mattei snc
55100 Lucca, Italy
P. +39 0583 15381
F. +39 0583 1538127
info@cisagroup.it
www.cisagroup.it